

BIOCREDIT Covid-19 抗原検査キット Nasal 簡易取り扱い説明書

※詳細は添付文書等をご覧ください。

測定の手順 —鼻腔ぬぐい液—

操作動画は
こちらから
ご覧ください。




1 検査の準備




検査を始める前に手を洗いましょう

2 準備するもの

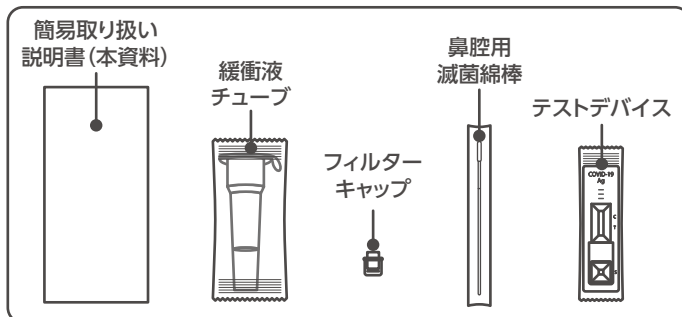

3 緩衝液チューブ

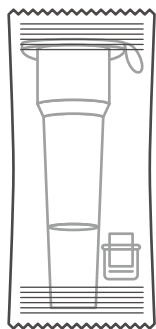


※フィルターキャップも同梱されています。



① 緩衝液チューブを取り出します。
(ハサミを使用しないで下さい)




② シールをはがします。

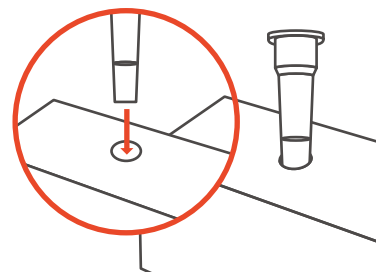


③ 緩衝液チューブを箱の中央にある穴に差し込みます。


4 鼻腔用滅菌綿棒

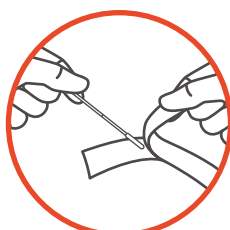

① 鼻腔用滅菌綿棒を取り出します。
その際、綿棒の先端に
触れないように注意して
ください。

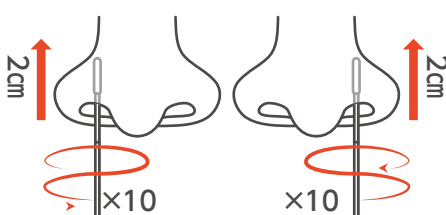

② 綿棒を鼻腔に2cm程度挿入し鼻腔の内側の粘膜に沿って綿棒をゆっくり10回転させ、粘膜表皮を採取します。同じ綿棒を使用して反対の鼻腔でも同様の操作を繰り返します。

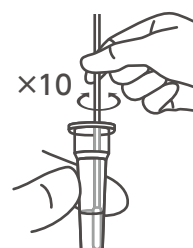

③ 綿棒を緩衝液が入ったチューブに挿入し、10回ほどかき混ぜます。



④ 細くなっている部分を目印に綿棒を折ります。


5 フィルターキャップ



※緩衝液チューブの入った袋に同梱されています。



① キャップを緩衝液が入ったチューブに押し込み、しっかりと合っていることを確認して下さい。

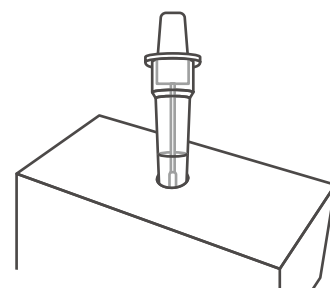

② キャップを取り付けたチューブを、箱の中央の穴に差し込みます。

BIOCREDIT Covid-19 抗原検査キット Nasal 簡易取り扱い説明書

※詳細は添付文書等をご覧ください。

測定の手順 —鼻腔ぬぐい液—


操作動画は
こちらから
ご覧ください。




6 テストデバイス



① テストデバイスを袋から取り出し、水平な所に置きます。

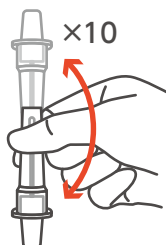

② 箱の穴に差し込んであるチューブを引き抜き、ゆっくり10回ほど混合させます。

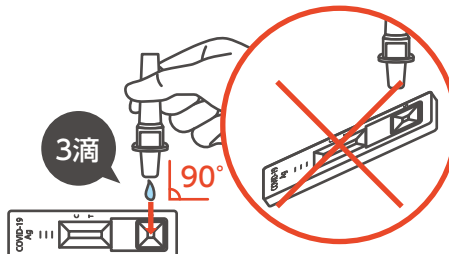

③ テストデバイスの検体滴下孔に、抽出した試料3滴を垂直に滴下します。(検査中は、テストデバイスを水平な場所に置き、動かさないでください。)




④ 15分後に結果を確認してください。ただし、15分より前でもCラインおよびTラインが確認された時点で陽性の判定を行うことはできません。

7 結果の判定


注意 30分を過ぎたテストデバイスは判定に使用しないでください。

陰性

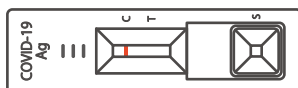


Cラインのみに赤色のラインが現れた場合、結果は陰性です。

陽性

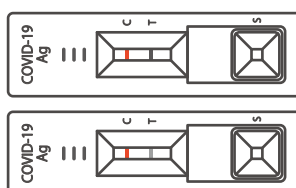

Cラインに赤色とTラインに黒色が現れた場合、結果は陽性です。

無効

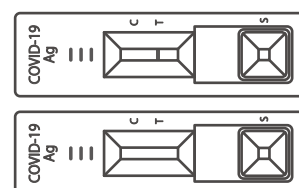

Cラインの赤色が認められない場合は、結果は無効と見なします。別の検査キットでやり直してください。

色の濃淡



廃棄方法

本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。**使用後の綿棒等は感染性を有するおそれがあります**ので、廃棄時の取り扱いには十分注意し、使用したキット(綿棒、チューブ等を含む)をごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋にいれる等、散乱しないように気をつけてください。